

# Pessary silikonowe „Dr Arabin”

We współczesnej uroginekologii należy dążyć do stosowania mało inwazyjnych, skutecznych metod leczenia. Ciągłe jeszcze jednak nie możemy za pomocą operacji wyleczyć wszystkich pacjentek. Jedną z metod nieinwazyjnej terapii zachowawczej, cieszącej się dużym powodzeniem wśród pacjentek, jest pessaroterapia. Oryginalne pessary „Dr Arabin” wykonane są z miękkiego silikonu, co znacznie poprawia tolerancję i zmniejsza ryzyko powikłań. Powodzenie terapii z użyciem pessarów zależy od ich prawidłowego dopasowania i zgodnego z zaleceniami stosowania przez pacjentki. Szeroko polecamy pessaroterapię tylko w ciągu dnia: rano pacjentka zakłada pessar, wieczorem go wyjmuje. Zaletą jest brak opłatów i odleżyn.

## Prowadzimy szkolenia

z dziedziny diagnostyki (m.in. aspekty praktyczne badania urodynamicznego) i leczenia nieoperacyjnego w uroginekologii, w tym stosowania pessaroterapii (indywidualny dobór pessara). Posiadamy filmy instruktarzowe. Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie na adres: [uroginekologia@gmail.com](mailto:uroginekologia@gmail.com).



### Pessar pierścieniowy gruby

Stosuje się zwykle u starszych pacjentek z niezbyt dużymi obniżeniami ścian pochwy i miernego stopnia wypadaniem macicy bez objawów nietrzymania moczu.



### Pessar cewkowy kołnierzykowy (ze zgrubieniem na okolicę cewki)

Stosowany przy wysiłkowym i mieszanym nietrzymaniu moczu, współwystępującym z obniżeniem ścian pochwy.



### Pessar talerzowy

### Pessar talerzowy perforowany


Zbudowany z miękkiego, elastycznego silikonu, dlatego może być z łatwością zginany, zakładany i wyjmowany bez uczucia bólu. Stosowany jest do leczenia niezbyt nasilonych postaci zaburzeń przepływu moczowo-płciowej i obniżenia pochwy.



### Pessar cewkowy

### (pierścieniowy ze zgrubieniem na okolicę cewki i aluminiowym rdzeniem)

Stosowany przy wysiłkowym lub mieszanym nietrzymaniu moczu - efekt ten uzyskuje się, gdy zgrubienie pessara podtrzymuje okolicę połączenia pomiędzy pęcherzem a cewką moczową.

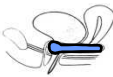

### Pessar kostkowy

Stosowany przy różnych stopniach obniżenia pochwy i macicy. Efekt podciśnienia pozwala na lepszą stabilność pessara. Są przydatne także do rozluźnienia zrostów i zwężeń pochwy oraz by leczyć kłopoty z oddawaniem moczu. Dodatkowo mogą być stosowane przed operacjami likwidującymi wypadanie pochwy i/lub macicy, wraz z estrogenami podawanymi dopochwowo, aby poprawić krążenie tkankowe. Przydatny w badaniu urodynamicznym w celu repozycji obniżenia.



### Pessar pierścieniowy

### (z aluminiowym rdzeniem)

Stosowany przy niezbyt nasilonych objawach wysiłkowego nietrzymania moczu oraz małym lub miernym obniżeniu ścian pochwy poprzez efekt podtrzymania okolicy podcewkowej.



### Pessar pierścieniowy

### z możliwością odkształcania

Pessar ten ma aluminiowy rdzeń, pozwalający na uformowanie do indywidualnych kształtów. Stosowany w leczeniu nietrzymania moczu i niewielkich zaburzeń statyki narządu płciowego jako alternatywa dla pessara pierścieniowego, jeżeli są one źle tolerowane ze względu na anatomiczne zmiany, zwykle wywołane wcześniejszymi operacjami.



### Pessar grzybkowy

Stosowane przy wypadaniu pochwy i macicy, jeżeli inne pessary nie są skuteczne. Również w przypadku ukrytego nietrzymania moczu. Trzon pessara pozwala na zmniejszenie efektu przysysania podstawy.



### Pessar tandem

Jest wykonywany na specjalne zamówienie, jeżeli pochwa nie jest w stanie utrzymać pojedynczego pessara. Są to połączone dwa pessary kostkowe, stosowane u pacjentek ze znacznym obniżeniem lub całkowitym wypadaniem pochwy i macicy. Dodatkowo pessar tandem może być przydatny w przypadkach wysiłkowego nietrzymania moczu: dolna kostka wspiera funkcję cewki moczowej.



### Expander pochwy

### (do rozszerzenia pochwy)

Wykonany ze specjalnego silikonu, jest elastyczny i dlatego może być zakładany bezboleśnie. Wskazany u pacjentek z wadami wrodzonymi lub jatrogeennymi zwężeniami pochwy.



### Pessar Cerclage

Wykonany jest ze specjalnego, delikatnego silikonu, jest elastyczny, może być zginany i zakładany bezboleśnie (przed założeniem należy wykluczyć infekcję). Stosowany u kobiet w ciąży z niewydolnością szyjki macicy w celu zapobiegania porodowi przedwczesnym. Prof. K. Nicolaidis i wsp. prowadzą badania nad zastosowaniem pessarów Dr Arabin w ciąży bliźniaczej.

Każdy lekarz ma możliwość zamówienia pakietu z sześcioma przez siebie wybranymi pessarami w promocyjnej cenie.

Produkcja w Niemczech: Dr. Arabin GmbH & Co. KG

Alfred - Herrhausen - Str. 44, D - 58455 Witten  
Tel. +49 (0)2302 18 92 14, fax. +49 (0)2302 18 92 16

[www.dr-arabin.de](http://www.dr-arabin.de) [info@dr-arabin.de](mailto:info@dr-arabin.de)

Firma wspiera Clara Angela Foundation

Dystrybucja w Polsce: Centrum Medyczne "Być kobietą..."

Stare Krasnodęby 15B, 95-070 Aleksandrów Łódzki  
Tel. +48 509 49 22 81, 0048 505 116 335, 0048 505 116 336  
[www.pessary.info.pl](http://www.pessary.info.pl) [pessary.pl@gmail.com](mailto:pessary.pl@gmail.com)

Szkolenia uroginekologiczne: [uroginekologia@gmail.com](mailto:uroginekologia@gmail.com)

